

Medizid® Rapid+ XXL Desinfektionstücher, Medizid® Rapid+ Desinfektionstücher

Desinfektionstücher für alkoholbeständige Oberflächen von Medizinprodukten



REF	Packungsinhalt	Versandeinheit	PZN
00947+	70 Stück	6 Rollen	16015280
00946+	70 Stück	1 Eimer	16015274
00941+	150 Stück	12 Dosen	16015268
00942+	150 Stück	20 Beutel	16015251

Allgemeine Informationen

Charakteristik

- VAH-zertifiziert
- aldehydfrei
- Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid wirksam
- Fungizid wirksam
- Mykobakterizid wirksam
- Tuberkulozid wirksam
- begrenzt viruzid wirksam
- begrenzt viruzid plus wirksam (wirksam gegen behüllte Viren und zusätzlich gegen Adenoviren, Noroviren, Rotaviren)
- viruzid wirksam

Anwendungshinweise

Ggf. sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Dann die Oberflächen sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen. Dabei auf eine vollständige Benetzung und die entsprechenden Einwirkzeiten achten. Die Wischreichweite kann durch die Oberflächenbeschaffenheit und Umgebungstemperatur variieren. Nur für den professionellen Gebrauch. Nicht geeignet für die Desinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten. Materialbeständigkeit ggf. an unauffälligen Stellen prüfen.

Zusammensetzung

Wirkstoffe in 100 g: 0,05 g
Didecyldimethylammoniumchlorid, 63,5 g Ethanol.

Haltbarkeit

Die Mindesthaltbarkeit der Medizid® Rapid Desinfektionstücher beträgt 3 Jahre (s. Etikettendruck). Um das vorzeitige Austrocknen der Tücher zu verhindern, Verpackung / Dose / Eimer direkt nach Gebrauch wieder verschließen. Haltbarkeit / Standzeit nach Anbruch: 28 Tage. Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass die Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25 °C erfolgt.

Allgemeine Hinweise

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. in Hinsicht auf Materialverträglichkeit, sind nur gesondert möglich. Unsere Empfehlungen befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen.

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.