

Medizid® Rapid QF Flowpack

Alkoholische Hygienetücher zur Desinfektion von Medizinprodukteoberflächen und Gegenständen



REF	Tuchgröße	Packungsinhalt	Versandeinheit	PZN
00976FP	Approx. 22 cm x 20 cm	80 Stück	12 Packungen	14440145

Allgemeine Inforamtionen

Charakteristik

- Wirksamkeit der Tränklösung Medizid® Rapid
- Gebrauchsfertig
- Aldehydfrei
- Sehr schnell und umfassend wirksam in bereits 15 sec.
- Wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid (inkl. M-terrae), mykobakterizid, virusinaktivierend (inkl. HBV / HIV)
- Wirksam gegen behüllte Viren: BVDV (HCV) und Vaccinia gemäß aktueller Empfehlung des RKI
- MRSA-wirksam und getestet (1 min)
- Rückstandsfrei
- Angenehmer Geruch
- Gute Materialverträglichkeit
- Viruzid wirksam gemäß 14476 (Polio / Adeno)
- Noroviren und SV 40 getestet

Anwendungshinweis

Für alle alkoholbeständigen medizinischen Geräte, Oberflächen und Gegenstände, insbesondere für Geräteoberflächen und Gegenstände in der Nähe des Patienten in Kliniken, Praxen, Krankenwagen und Pflegebereichen. Medizid® Rapid QF Desinfektionstücher (Flowpack) sind gebrauchsfertig. Die zu desinfizierenden Flächen und Gegenstände sind sorgfältig mit dem Medizid® Rapid Wischtuch abzuwischen und vollständig anzufeuchten. Einwirkzeit: 60 Sekunden nach EN 16615 (4-Felder-Test).

Zusammensetzung:

In Medizid Rapid QF sind in 100 g als Wirkstoff erhalten: 50g Ethanol.

Haltbarkeit

Die Mindesthaltbarkeitsdauer der Medizid® Rapid Desinfektionstücher beträgt 3 Jahre (siehe Etikett). Um ein vorzeitiges Austrocknen der Wischtücher zu verhindern, ist die Verpackung unmittelbar nach Gebrauch wieder zu verschließen. Haltbarkeit / Verfallsdatum nach dem Öffnen: 28 Tage. Die Produkte dürfen nur im original verschlossenen Behälter gelagert werden, eine Kontamination bei der Produktentnahme ist zu vermeiden, und die Produkte sind unter Standard-Lagerbedingungen (geschützt vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) bei einer Temperatur zwischen 5 - 25° C aufzubewahren und zu lagern.

Allgemeine Hinweise

Vorsicht bei alkoholempfindlichen Material. Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. in Hinsicht auf Materialverträglichkeit, sind nur gesondert möglich. Unsere Empfehlungen befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen.

Regulatorische Information

Biozid Reg. Nr. N-75574